

Lingettes désinfectantes épaisses Aseptonet en sachet

Codes produits :

Référence 140328



caractéristiques du produit :

Conditionnement: Sachet - 100 ex

Composition: Sans alcool

Application: Instrumentation

Application: Sellerie

Application: Mobilier

Format: Lingette

Action: Désinfectant

Description brève du produit :

100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel, dispositifs médicaux.

Nouvelle formule sans alcool : convient aux selleries.

Description du produit :

Destinations :

Nettoyage et désinfection :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).
- Selleries de tables, tabourets, coussins...

Formule :

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique.
- Parfum : Menthol.
- Actifs : Diméthylbenzylammonium chloride (CAS 7173-51-5) : 0.29%.

Mode d'emploi :

- Produit prêt à l'emploi à usage unique.
- Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet.
- Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes.
- Ne pas rincer.

Précautions d'emploi :

- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Aucun pictogramme de danger.
- En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.
- Produit destiné aux professionnels.

Conditionnement :

Conditionnement en sachet de 100 lingettes.

Informations complémentaires :

- Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.
- Produit fabriqué en France.

Formule :

Propriétés microbiologiques à 20°

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus.	5 min
	EN16777** sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus	

*3g/L albumine bovine + 3 mL/L érythrocytes de mouton , ** 3g/L albumine bovine

Attributs du produit :