

Lingettes désinfectantes Aseptonet en boîte



Codes produits :

Référence 140262

caractéristiques du produit :

Conditionnement: Boîte - 100 ex

Composition: Sans alcool

Application: Instrumentation

Application: Mobilier

Format: Lingette

Action: Désinfectant

Description brève du produit :

100 lingettes désinfectantes Aseptonet pour nettoyer les surfaces, le petit matériel, les dispositifs médicaux et les selleries de tables de massage. En boîte.

Sans alcool.

Description du produit :

Les **lingettes désinfectantes Aseptonet en boîte** sont conçus pour le nettoyage et la désinfection des :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).
- Des dispositifs médicaux non-invasifs et non immergeables (petit matériel en milieu médical et dentaire).
- Convient à la désinfection des tables de massage.

Formule

- **Parfum** : Menthol.
- **Actifs** : Chlorure de Didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 0,29 %.

Mode d'emploi

- Produit prêt à l'emploi à usage unique.
- Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité.
- Tirer la lingette centrale à l'intérieur du capot.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.

- Laisser agir 5 minutes.
- Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Conseil fabricant : utilisez 8 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter.

Précautions d'emploi

- Produits destinés aux professionnels.
- Ne pas jeter dans l'environnement.
- Aucun pictogramme de danger.
- Utiliser les biocides avec précaution.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus	5 min

*3g/L albumine bovine, ** 3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton

Les caractéristiques des lingettes désinfectantes Aseptonet

- Conditionnement : boîte de 100 lingettes.
- Lingettes fines de 120 x 200 mm.
- Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.
- Produit fabriqué en France.

Attributs du produit :