

Schwa-Medico Tens Eco 2



Codes produits :

Référence : 182045

Caractéristiques du produit :

Canaux: 2 voies
Courants: TENS
Traitements: Douleurs
Traitements: Sport
Traitements: Réhabilitation
Traitements: Nausée
Nbre de programmes: 24
Largeur d'impulsion: 50 à 400 μ s
Intensité: 0,5 à 100 mA
Fréquences: 1 - 120 Hz
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé
Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm
Longueur: 11,5 cm
Largeur: 6,7 cm
Hauteur: 2,6 cm
Poids: 150 g
Garantie: 2 ans

Description brève du produit :

Le Tens Eco 2, votre allié pour un soulagement efficace et durable des muscles et des articulations. Grâce à une stimulation électrique contrôlée, ce neurostimulateur offre un effet analgésique ciblé, améliorant votre bien-être au quotidien. Optez pour le confort et la performance avec le Tens Eco 2.

Description du produit :

Optimisé pour procurer un soulagement doux et puissant, **le neurostimulateur TENS Eco 2** offre une facilité d'utilisation remarquable tout en étant extrêmement polyvalent.

L'électro-neurostimulation transcutanée, une approche non médicamenteuse et simple pour atténuer les douleurs, trouve son allié efficace dans le neurostimulateur TENS Eco 2. Fonctionnant selon deux principes fondamentaux - le gate control et la libération d'endorphines - cet appareil novateur propose une solution double. Dans le premier scénario, le signal électrique émis par les électrodes atteint en priorité le système nerveux central, bloquant ainsi le message douloureux. Dans le second scénario, l'appareil stimule la production d'endorphines par le corps.

Le TENS Eco 2 ne se limite pas seulement à soulager la douleur, il intègre également un programme dédié au renforcement musculaire.

Son adaptabilité exceptionnelle se manifeste à travers ses 13 programmes préétablis, chacun variant en termes de durée, de fréquence et de largeur d'impulsion. Les paramètres modifiables incluent le temps, la largeur d'impulsion et la fréquence.

En plus de cela, le dispositif propose des programmes spécifiques pour le traitement du visage, agissant sur les nausées et sollicitant le nerf vague. Cette fonction permet une intervention efficace sur diverses pathologies telles que

l'épilepsie, les acouphènes, l'hypertension, les problèmes digestifs, et la dépression, grâce à la libération d'acétylcholine.

https://youtu.be/kz42bL_kznY?si=99lQvOJgTjyNMRkm

Les points forts du Tens Eco 2

- **2 canaux** indépendants.
- **24 programmes** : 13 programmes prédéfinis et 11 programmes modifiables (*dont 22 antalgiques et 2 excito-moteur*).
- **Simple d'utilisation** : aussi bien pour les professionnels que les particuliers.
- **Timer réglable** : de 0 à 99 min ou en continu.
- Boîtier plastique souple spéciale anti-choc et prise câble de stimulation vers le bas.
- **Rapport qualité-prix exceptionnel** : associe puissance, polyvalence et qualité de construction à un prix abordable.
- Dispositif médical de classe IIa + marquage CE : conformité aux normes médicales les plus strictes.

Fonctions spécifiques GATE CONTROL

Par stimulation dynamique massante anti-accoutumance.

SOFT TOUCH

Clavier de commande Soft Touch.

Ni-Mh

Intègre des accumulateurs rechargeables Ni-Mh pour une utilisation plus intense et plus économique.

OBSERVANCE DU TRAITEMENT Indications

- Douleurs post-zostériennes
- Douleurs neuropathiques cicatricielles
- Douleurs du moignon/membre fantôme
- Douleurs radiculaires cervico-brachiales
- Lombosciatalgie chronique
- Algoneurodystrophie
- Fibromyalgie et douleurs myofasciales
- Cervicalgie chronique
- Lombocruralgie
- Migraines rebelles
- Névralgie du trijumeau
- Lombalgie chronique

13 Programmes préétablis

10 ANTALGIQUES TENS

- **Gate Control 100 Hz** (exemple d'utilisation : douleurs neuropathiques).
- **Gate Control 80 Hz** (exemple d'utilisation : douleurs neuropathiques).
- **Endorphinique 2 Hz.**
- **Gate control** (Canal 1) + **Endorphinique** (Canal 2).
- **TENS Séquentiel** (Gate Control suivi d'un mode endorphinique).
- **Stimulation HAN** (variation entre l'endorphinique et le Gate Control).
- **TENS Burst** (comme l'endorphinique, mais plus agréable).
- **TENS Modulation de fréquence** (prévient le phénomène d'accoutumance).
- **Gate control 100 Hz Dynamic lent®** (plus confortable et réduction de l'accoutumance).
- **Gate control 80 Hz Dynamic Rapide®** (plus confortable et réduction de l'accoutumance).
- **TENS Haute fréquence.**

2 REHAB (Excito-Moteur)

- Renforcement Musculaire
- Stimulation Faciale (stimulation du visage)

1 Traitement des Nausées

- Traitement des Nausées 10 Hz

Les caractéristiques de l'appareil d'électrothérapie Tens Eco 2 - Schwa Medico

- Canaux : 2 canaux indépendants
- Fréquence : de 1 à 120 Hz
- Intensité : de 0,5 à 100 mA
- Largeur d'impulsion : de 50 à 400 µs
- Alimentation : accumulateurs rechargeables NiMh intégrés 4,8 V/700 mAh
- Écran rétroéclairé bleu
- Dispositif en classe IIA
- Marquage CE
- Dimensions : 115 x 67 x 26 mm
- Poids 150 g

Composition du set Tens Eco 2

- 1 stimulateur Tens Eco 2
- 1 bandeau de tour de cou
- 2 câbles renforcés
- 4 électrodes
- 1 chargeur
- 1 guide
- 1 manuel d'utilisation
- 1 mallette de transport

Attributs du produit :