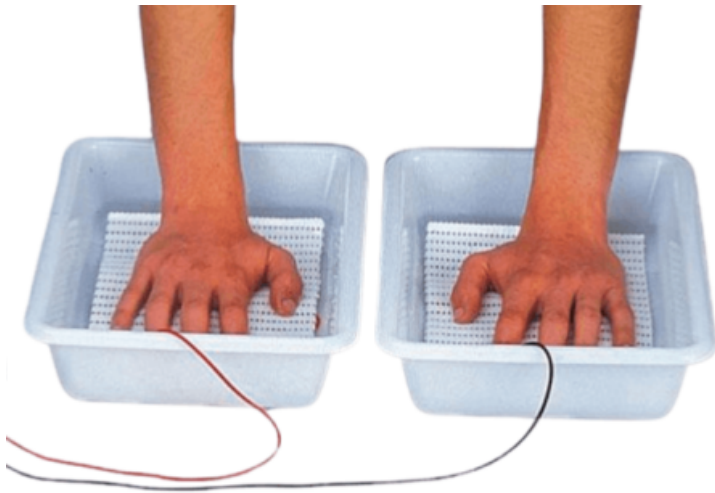


Kit hyperhidrose

**Codes produits :**

Référence : 185010x

Caractéristiques du produit :**Description brève du produit :**

Le kit hyperhidrose est spécialement conçu pour une utilisation avec les mains ou les pieds.

Description du produit :

Ce kit hyperhidrose est spécialement conçu pour une utilisation avec les mains (hyperhidrose palmaire) et les pieds (hyperhidrose plantaire). Il permet de combattre la transpiration excessive, due à une hyperactivité du système nerveux sympathique.

Le kit s'utilise avec un appareil galvanique pour réaliser un traitement ionophorèse. Cette méthode utilise un courant électrique de faible intensité.

Comment fonctionne le kit hyperhidrose ?

- Branchez le kit sur votre appareil galvanique
- Assurez-vous que les électrodes soient bien placées sous la grille protectrice, dans le fond des bacs plastiques
- Placez les mains ou les pieds de votre patient dans les zones conçues à cet effet (bac plastiques)

Le kit hyperhidrose est livré avec :

- 2 bacs rectangulaires : 35 x 23 x 7 cm
- 2 caillebotis souples
- 2 électrodes caoutchouc conducteur

Attributs du produit :

Connecteurs: Fiche mâle - Ø4 mm, Prise femelle - Ø2 mm