


## Kit hyperhidrose

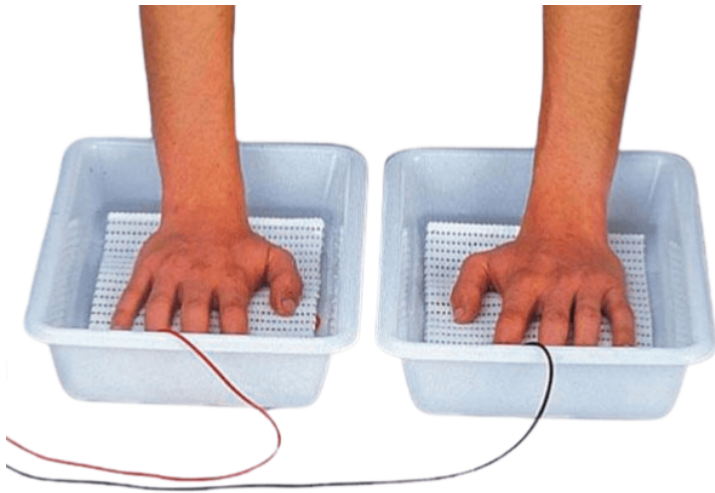

### Codes produits :

Référence 185010x

### caractéristiques du produit :

### Description brève du produit :

Le kit hyperhidrose est spécialement conçu pour une utilisation avec les mains ou les pieds.

### Description du produit :

Ce kit hyperhidrose est spécialement conçu pour une utilisation avec les mains (hyperhidrose palmaire) et les pieds (hyperhidrose plantaire). Il permet de combattre la transpiration excessive, due à une hyperactivité du système nerveux sympathique.

Le kit s'utilise avec un appareil galvanique pour réaliser un traitement ionophorèse. Cette méthode utilise un courant électrique de faible intensité.

### Comment fonctionne le kit hyperhidrose ?

- Branchez le kit sur votre appareil galvanique
- Assurez-vous que les électrodes soient bien placées sous la grille protectrice, dans le fond des bacs plastiques
- Placez les mains ou les pieds de votre patient dans les zones conçues à cet effet (bac plastiques)

### Le kit hyperhidrose est livré avec :

- 2 bacs rectangulaires : 35 x 23 x 7 cm
- 2 caillebotis souples
- 2 électrodes caoutchouc conducteur

### Attributs du produit :

Connecteurs: Fiche mâle - Ø4 mm, Fiche femelle - Ø2 mm