

Shaker Medic Plus

Codes produits :

Référence : 271871

Caractéristiques du produit :



Description brève du produit :

Shaker Medic Plus POWERBreathe® : Rééducation respiratoire avancée. Intensité accrue, fonction pulmonaire améliorée, et récupération post-Covid. Indispensable pour les kinésithérapeutes.

Description du produit :

Pourquoi choisir le Shaker Medic Plus pour vos séances de rééducation ?

Le Shaker Medic Plus est la dernière génération d'appareils qui utilise un flux d'air amélioré pour des vibrations d'intensité supérieure. Il est idéal pour favoriser l'expectoration, améliorer la fonction pulmonaire et réduire la dyspnée. En dégageant les voies respiratoires, il contribue à réduire le risque d'infections pulmonaires aiguës et améliore la fonction pulmonaire, réduisant ainsi la fatigue. Des études cliniques ont démontré les bénéfices du Shaker Medic Plus POWERBreathe® : réduction de l'essoufflement, amélioration de la qualité de vie et renforcement de la tolérance à l'exercice.

Le Shaker Plus POWERBreathe® pour la récupération post-Covid :

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionne POWERBreathe® dans son plan de gestion du rétablissement pour la réadaptation des personnes atteintes de la Covid-19. Des recherches récentes ont établi un lien entre les performances des muscles respiratoires et la Covid-19. Ainsi, l'utilisation du Shaker Medic Plus POWERBreathe® pourrait aider à :

- Prévenir la maladie : chez les personnes à risque, un entraînement des muscles respiratoires précoce lors d'une pandémie virale pourrait aider à prévenir la maladie.
- Favoriser la récupération après la Covid-19 : l'entraînement des muscles respiratoires peut accélérer le processus de récupération.
- Traiter le syndrome post-Covid : les personnes souffrant du syndrome post-Covid sont souvent confrontées à un essoufflement extrême qui peut être dû à un dysfonctionnement du muscle diaphragme. Le Shaker Medic Plus POWERBreathe® cible ce problème en utilisant les principes de l'entraînement en résistance pour

améliorer la force et l'endurance des muscles inspiratoires, réduisant ainsi la fatigue.

Dans quelles situations utiliser le Shaker Medic Plus POWERBreathe® ?

Le Shaker Medic Plus POWERBreathe® est recommandé pour les cas suivants :

- Maladie pulmonaire obstructive chronique
- Fibrose kyst
- Covid-19
- Bronchectasie
- Bronchite
- Patients avec des performances respiratoires altérées

Comment utiliser le Shaker Medic Plus POWERbreathe® ?

Il est conseillé d'utiliser le Shaker en position assise ou couchée car il est possible d'avoir des vertiges en utilisant l'appareil. Si vous devenez étourdi, arrêter d'utiliser le Shaker et respirer calmement par le nez.

- Tenir fermement l'appareil Shaker en position horizontale.
- Placer l'appareil dans la bouche et inspirer lentement et profondément par le nez pour remplir les poumons puis maintenir pendant 2 à 3 s.
- Ensuite, avec les lèvres scellées autour de l'embout buccal, prendre une longue expiration.
- Prendre quelques inspirations et expirations par le nez avant de recommencer les étapes 2 et 3.
- Répéter le processus une dizaine de fois jusqu'à ce que l'hygiène bronchique soit atteinte. Expulser la sécrétion en toussant doucement et en crachant dans un mouchoir.

Le nombre de répétitions peut varier en fonction du patient et de toute orientation médicale ou physiothérapeutique.

Les caractéristiques du Shaker Medic Plus

- Force de résistance : 8 cm H₂O
- Peut être stérilisé dans un autoclave
- Facile d'entretien
- Convient aux enfants et aux adultes
- Norme : CE Médical Classe I

Attributs du produit :