

Cross Tape - Crossling

Codes produits :

Référence 2360

caractéristiques du produit :

Quantité: Selon modèle

Coloris: Beige



Description brève du produit :

Découvrez le soulagement instantané avec les Cross Tapes de CrossLinq. Ces pansements quadrillés, disponibles en plusieurs tailles, sont adhésifs, résistants à l'eau, et polyvalents pour une application facile sur les points douloureux.

Description du produit :

Les **Cross Tape** de la marque **CrossLinq**, sont des pansements grillagés révolutionnaires conçus spécifiquement pour le traitement de la douleur. Développés avec une technologie avancée, ces petits patchs garantissent un minimum d'irritation cutanée, tout en offrant un pouvoir adhésif exceptionnel.

Sans aucun principe actif, les Cross Tapes sont destinés à être appliqués directement sur le point douloureux, le point d'acupuncture ou le point trigger. L'utilisation de ces patchs est conseillée pour les professionnels formés.

La résistance à l'eau de ces pansements permet de les porter en toute liberté pendant plusieurs jours, sans aucune restriction. Leur adhérence peut persister pendant plusieurs semaines, offrant un soulagement durable. Profitez des bienfaits des Cross Tape pour une approche naturelle du soulagement de la douleur, tout en bénéficiant de la qualité Crossling.

Les points forts du Cross Tape

- **Polyvalent** : Soulage les douleurs nerveuses, musculaires et les restrictions de mouvement.
- **Tailles variées** : Disponible en trois tailles pour une application précise.
- **Amélioration énergétique** : Favorise un meilleur flux d'énergie dans le corps.
- **Rapides et efficaces** : Procure des résultats rapides pour un soulagement immédiat.
- **Adhésif et résistant à l'eau** : Maintient une adhérence durable, même lors d'activités aquatiques.

Guide d'utilisation pour le produit CrossTape - CrossLinq :

1. **Préparation de la peau** : avant l'application, assurez-vous de nettoyer soigneusement la peau pour optimiser l'efficacité du Cross Tape. Séchez correctement la zone d'application.
2. **Positionnement** : placez le Cross Tape directement sur le point douloureux, le point d'acupuncture ou le point trigger. (*ATTENTION ne pas appliquer sur des plaies, des brûlures, des muqueuses, près de la bouche, du nez ou des yeux*).
3. **Application** : pour une adhérence maximale, tirez lentement sur la bande dans le sens de la pousse du poil.
4. **Retrait** : lorsque vous souhaitez retirer le Cross Tape, procédez délicatement en suivant le sens naturel de la croissance des poils. (En cas de difficulté : utilisez une solution spécifique facilitant le retrait des bandes adhésives cutanées).

Suivre ces étapes garantira une utilisation optimale du produit CrossTapde et maximisera les bienfaits pour le soulagement de la douleur.

Les caractéristiques du Cross Tape

- Coloris : beige.

Modèle	Dimensions	Nombre total de patches
S	1,9 x 1,5 cm	240 patches
M	2,8 x 2,1 cm	160 patches
L	5,2 x 4,3 cm	40 patches

Attributs du produit :

Taille: S (1.9x1.5cm), M (2.8x2.1cm), L (5.2x4.3cm)