

Lightforce XPi 25W - Appareil de laser-thérapie



Codes produits :

Référence 151212

caractéristiques du produit :

Puissance: 25 W
Têtes fournies: 5
Longueur: 43 cm
Largeur: 28 cm
Hauteur: 26 cm
Poids: 9 kg
Alimentation: Secteur
Garantie: 2 ans
Mode d'émission: Continu
Mode d'émission: Pulsé

Description brève du produit :

Découvrez le LightForce XPi 25W de Chattanooga, un appareil de laser-thérapie de pointe livré avec 5 têtes de traitement. Idéal pour soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires, ce laser offre des traitements précis et sûrs, parfaits pour la récupération après l'activité physique et le soulagement de la douleur liée à l'arthrose. Optez pour une thérapie laser intelligente et efficace avec le LightForce XPi 25W.

Démonstration gratuite en cabinet sur demande.

Contactez-nous au 03.88.59.89.59 ou sur info@firn.fr

Description du produit :

La thérapie Laser

La Thérapie Laser des Tissus Profonds™ est une méthode avancée pour traiter efficacement les douleurs musculaires et articulaires causées par des lésions aiguës ou chroniques des tissus mous. Elle est spécialement recommandée pour soulager les symptômes de l'arthrose en améliorant la circulation sanguine locale, ce qui diminue la douleur et la raideur. En conséquence, le laser thérapeutique est une option idéale pour favoriser la récupération après une activité physique intense.

[Indications](#)

- Cervicalgie.
- Lombalgie.
- Sciatique.
- ATM.
- Douleur au coude et douleur articulaire.
- Arthrite.

https://youtu.be/hPgGeNSFIOW?si=I-Gd4h_6fzATx0L6

Lightforce XPi 25W : traitement de grande précision et intelligence intégrée

Découvrez l'**appareil de laser-thérapie Lightforce XPi 25W de Chattanooga**. Idéal pour traiter les douleurs musculaires et articulaires associées aux lésions des tissus mous, ainsi que pour soulager la douleur et la raideur causées par l'arthrose en augmentant la circulation sanguine locale. Sa technologie avancée assure des traitements reproductibles et précis, offrant une récupération efficace après l'activité physique.

Avec une durée moyenne de traitement de 4 à 7 minutes, la thérapie au laser avec le Lightforce XPi 25W offre aux thérapeutes la possibilité d'intégrer efficacement ce traitement dans un plan de soins global, optimisant ainsi leur temps de traitement disponible.

Les points forts du laser Lightforce XPi 25W

- **Pénétration rapide dans les tissus profonds** grâce à sa puissance de 25W.
- **Feedback de dosage en temps réel pour des résultats précis et cohérents.**
- **Technologie Influence®** pour un traitement personnalisé basé sur les caractéristiques du patient.
- **Système Empower IQ™** : la nouvelle génération de technologie de diffusion.
- **Têtes à déconnexion rapide** pour une utilisation polyvalente.
- **Pièce à main intelligente** offrant un retour d'information en temps réel pour améliorer la précision du dosage.
- **Technologie exclusive des boules de massage** offrant divers avantages pour le traitement.
- **Temps de traitement court** (4 à 7 minutes en moyenne) pour une intégration facile dans un plan de soins global.

https://youtu.be/xmJWbBng_3Q?si=5Sjvb9naFAhaeeOg

5 têtes de traitement exclusives Lightforce



Tête plate

Traitement des tissus superficiels sur de petites à moyennes surfaces.



Petit cône sans contact

Idéal pour les zones très étroites ou précises.



Large cône sans contact

Traitements sans contact, avec une puissance plus élevée.



Petite boule de massage

À utiliser avec une puissance faible à modérée.



Grande boule de massage

Réduit la diffusion de la lumière sur la surface + compression physique des tissus.

Focus sur la boule de massage

La boule de massage brevetée exclusive LightForce® permet au thérapeute d'effectuer un traitement en contact sur le patient.

- **COMPRESSION** : la boule de massage avec contact comprime les tissus superficiels, déplaçant l'excès de liquide et améliorant la pénétration du laser dans les structures profondes. Cette compression réduit les obstacles des absorbeurs superficiels.
- **COLLIMATION** : la boule de massage agit pour collimater la transmission de la lumière aux tissus, réduisant ainsi la perte d'énergie.
- **INDICE DE RÉFRACTION** : la composition en silice fondue de la boule de massage permet de minimiser la perte de lumière lors du passage de la boule sur la peau.
- **RÉFLEXION** : l'application avec contact permet la diffusion dans les tissus en minimisant la perte d'énergie due à la réflexion.
- **TRAVAIL SUR LES TISSUS MOUS** : la boule de massage permet au professionnel de santé d'effectuer un travail manuel sur les tissus mous avec l'applicateur tout en diffusant l'énergie.

Lorsque le traitement au laser est appliqué directement sur la peau avec contact, la réflexion de l'énergie est moindre et les tissus sont comprimés. Cela se traduit par beaucoup plus d'énergie atteignant le tissu cible.



Lasers Lightforce de Chattanooga

TECHNOLOGIE INFLUENCE®


La technologie Influence® adapte le traitement en fonction des caractéristiques d'absorption du patient et de son état clinique spécifique. Elle tient compte des spécifications individuelles telles que l'état, le type corporel et le type de peau. Les réglages approfondis du protocole recommandent les paramètres appropriés sur les têtes de traitement et les niveaux de puissance pour favoriser la confiance du thérapeute et la réduction du temps d'apprentissage de prise en main.

PUISSANCE

Le laser thérapeutique LightForce® XPi offre une plage de puissance allant de 1 à 25 watts, permettant d'atteindre efficacement les tissus profonds. L'augmentation de la puissance réduit le temps nécessaire pour administrer une dose thérapeutique d'énergie lumineuse, ce qui permet aux thérapeutes de réduire la durée des traitements appropriés. La puissance plus élevée permet des traitements en profondeur et plus rapides, couvrant une surface plus large de tissus en moins de temps.

Système Empower IQ™

Le système Empower IQ™ de LightForce® change la donne en matière d'émission pour la thérapie au laser. Conçu pour être convivial et réactif, Empower IQ™ est la nouvelle génération de technologie de diffusion.

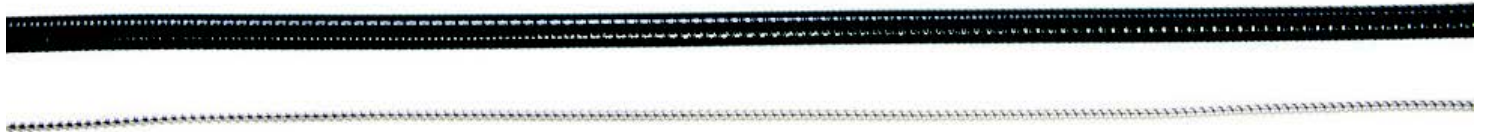

Fibre

La fibre est fabriquée avec une qualité exceptionnelle et une durabilité e niveau supérieur, offrant une longueur supplémentaire pour une commodité accrue de l'utilisateur.



Têtes à déconnexion rapide

Les têtes de traitement sont facilement détachables et remplaçables pour une utilisation pratique et des options de traitement variées. Le système intelligent détecte automatiquement les bons applicateurs, les têtes de traitement et ajuste la puissance et la vitesse de balayage en fonction des besoins du traitement.



*Vitesse
recommandée*



*Vitesse trop
rapide*



*Vitesse trop
lente*

Pièce à main intelligente

Intègre une technologie de feedback de dosage avec interrupteur et voyants lumineux intégrés. Elle évalue la vitesse de l'opérateur et fournit un retour d'information visuel et sensoriel en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité des traitements et la précision du dosage. Conçue de manière ergonomique pour assurer le confort de l'opérateur.

Les caractéristiques de l'appareil de laser-thérapie Lightforce XPi 25W

- Type de laser : Class IV, solide.
- Longueur d'ondes : 980/810 nm.
- Puissance : 1W-25W.
- Modes de fonctionnement : continu ou pulsé.
- Pointeur laser : 650 nm, 4,5 mW.
- Durée moyenne de traitement : 4 à 7 minutes.
- Dimensions : 43 x 28 x 26 cm.
- Poids : 9 kg.
- Garantie : 2 ans.

Ce dispositif médical est un produit de santé de classe IIa réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Il a été évalué par l'organisme notifié BSI. Fabricant LiteCure LLC. Lire attentivement la notice.

Composition du kit

- Système de laser thérapeutique LightForce XPi (25W).
- Pièce à main - Système Empower IQ 800 µm.
- Capot anti poussière pour pièce à main.
- Tête de traitement - Tête plate.
- Tête de traitement - Petit cône sans contact.
- Tête de traitement - Large cône sans contact.
- Tête de traitement - Petite boule de massage.
- Tête de traitement - Grande boule de massage - Rolling.
- Bande LightForce noire.
- Sac de transport.

- Mallette de kit de fixation.
- Cordons d'alimentation.
- Sur-lunettes de protection (DE 5+).
- Lunettes de protection ordinaires, LightForce Vertes (DE 5+).

- Protection partielle du visage avec lunettes de protection.

Attributs du produit :