

Surfa'Safe R Premium Anios détergeant/désinfectant agrumes - 750 ml



Codes produits :

Référence 140323

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 750 ml

Composition: Sans alcool

Application: Mobilier

Format: Spray

Action: Désinfectant

Action: Détergeant

Description brève du produit :

Surfa'Safe Premium R de Anios est une mousse détergente désinfectante parfumée et prête à l'emploi. Elle est destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires. Sa formule douce et efficace à large spectre garantit un nettoyage en une seule étape, avec un temps de contact rapide. Disponible en spray mousse de 750 ml, il est idéal pour les zones à haut risque.

Description du produit :

Le produit **Surfa'Safe Premium R** de Anios est un détergent désinfectant prêt à l'emploi, spécialement formulé pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et des surfaces générales. Il offre une efficacité à large spectre avec des temps de contact rapides, tout en étant compatible avec les surfaces sensibles à l'alcool. Sa formule douce, permet de nettoyer et désinfecter en une seule étape. Idéal pour les zones à haut risque, il est disponible en spray mousse de 750 ml.


Mousse détergente désinfectante parfumée

- Solution prête à l'emploi.
- Nettoie et désinfecte en une seule opération, laissant la surface visiblement propre.
- Sans alcool.
- Parfum frais d'agrumes.
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé.
- Sa formulation permet le séchage rapide des surfaces.
- Son dispenseur de mousse compacte permet de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants.
- Sa mousse compacte évite tout surplus sur les surfaces à traiter.
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage.
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex :

polycarbonate, plexiglas ...).

Comment utiliser le détergeant et désinfectant Surfa'Safe Premium R Anios ?


- Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.
- Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m2 soit environ 10 pulvérisations).
- Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.
- Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.
- Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.
- Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

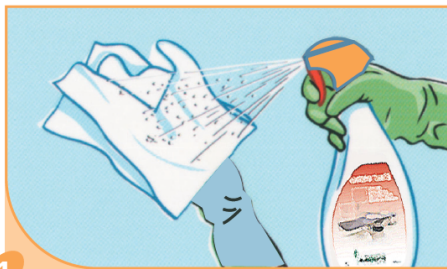

1 Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé.



2 Répartir la mousse sur la zone à traiter.

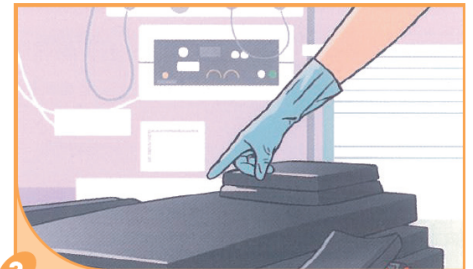

3 Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses). Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée.

Les caractéristiques du détergeant/désinfectant Surfa'Safe Premium R de Anios

- Stockage entre +5°C et +25°C.
- Usage réservé aux professionnels.

Pour une utilisation en toute sécurité des dispositifs médicaux et biocides : merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

[Composition](#)

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.



Made in France – Laboratoires Anios

Les produits de la marque Anios sont fabriqués en France, à Sainghin-en-Mélantois (59), dans le respect des normes les plus strictes en matière d'hygiène et de désinfection. Un gage de qualité, de traçabilité et de proximité pour les professionnels de santé.

Attributs du produit :