

## Moves Cycle - Pédalier actif/passif



### Codes produits :

Référence 244748

### caractéristiques du produit :

Zones travaillées: Membres inférieurs

Zones travaillées: Membres supérieurs

Travail: Actif

Travail: Passif

Alimentation: Secteur

Durée d'utilisation: 3 h/jour

Norme: CE Médical

### Description brève du produit :

Le pédalier Moves Cycle est un modèle actif/passif, qui permet au choix, un entraînement du haut et du bas du corps. Il est idéal pour la rééducation et la réathlétisation. Équipé de 5 modes, entraînement actif/passif, programmes U1-U3 et pédalage bidirectionnel. Robuste et durable.

### Description du produit :

Le **pédalier Moves Cycle** est conçu pour la rééducation et la réathlétisation, aidant à prévenir, réduire et améliorer les effets de l'immobilité. Idéal pour les patients souffrant de troubles neuromusculaires, orthopédiques, cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que d'autres pathologies limitant les mouvements ou nécessitant un allègement prolongé. Grâce à sa conception robuste et de haute qualité, cet exerciceur actif-passif assure un fonctionnement continu sur de longues durées.

## Entraînement du haut et du bas du corps

Le **pédalier Moves Cycle** permet de réaliser des exercices du haut et du bas du corps. Pour ce faire, il vous suffit d'installer la paire de pédales ou de poignées (toutes les deux fournies), sur l'appareil. Cette action est très simple à faire, les pédales et poignées sont très faciles à changer.

## En utilisation pour le bas du corps

Le patient est installé sur une chaise, avec le pédalier devant lui. Il place alors ses pieds dans les pédales, de sorte à avoir une distance confortable avec l'appareil. Il peut prendre la console en main, afin de suivre les données d'entraînement.



**moves**  
**En utilisation pour le haut du corps**

L'appareil peut être placé sur une table, de sorte à offrir une position confortable au patient lors de la réalisation des exercices. Il place ses mains sur les poignées, de sorte à les saisir confortablement.



## Modes d'exercice

Le pédalier Moves Cycle propose 5 modes pour optimiser la rééducation et la réathlétisation de vos patients :

- **Mode actif** : l'utilisateur contrôle entièrement la vitesse et la résistance (*résistance fixe : le patient est l'acteur du mouvement. La résistance au mouvement n'est pas réglable.*).
- **Mode passif** : la machine effectue le mouvement, avec possibilité d'ajuster la vitesse et la résistance.
- **3 modes prédéfinis** (U1, U2, U3) : la vitesse s'adapte automatiquement toutes les minutes sur une durée réglable de 10 minutes.
  - **U1** : intensité faible.
  - **U2** : intensité moyenne.
  - **U3** : intensité élevée.

**NB** : En mode passif ou sur un mode prédéfini, il est possible d'alterner le sens du pédalage (avant ou arrière) pour une stimulation complète des muscles.

## Les équipements du pédalier Moves Cycle

- 2 modes : actif et passif.
- Pour le haut et le bas du corps, au choix (*pas en simultané*).
- Équipé de grandes pédales pour les exercices des jambes.
- Équipé de poignées pour les exercices des bras.

- Comprend une détection anti-spasme.
- Doté d'une large console avec affichage, posée sur son support et reliée par un câble, permettant de la prendre en main pendant les exercices.



## Les caractéristiques du pédalier Moves Cycle

- Durée maximale d'utilisation conseillée : 3h/jour.
- Alimentation : secteur 240V.
- Norme : dispose du CE Médical.

## Composition du kit :

- 1 adaptateur.
- 1 console avec affichage.
- 1 clé de sécurité.
- 1 tapis.
- 1 cordon secteur.
- 1 paire de pédales.
- 1 paire de poignées.

## Attributs du produit :