

Pack i-Press 10+ avec paire de bottes + 1 manchon 7cellules + guéridon - Appareil de pressothérapie



Codes produits :

Référence 280099

caractéristiques du produit :

Appareils: i-Press 10+
Pression: 30 - 100 mmHg
Nbre de programmes: 28
Nbre de cellules: 10
Contenu du pack: 1 manchon 7 cellules
Contenu du pack: 1 appareil
Contenu du pack: 1 guéridon
Contenu du pack: 1 paire de bottes 10 cellules
Affichage: Ecran tactile
Alimentation: Secteur

Description brève du produit :

Appareil de pressothérapie i-Press 10+ Mazet santé. Pack pour professionnels avec paire de bottes + manchon + guéridon sur roulettes.

Description du produit :

i-Press 10+ : Appareil de pressothérapie connecté

L'**i-Press 10+** est un **appareil de pressothérapie dernière génération**, conçu pour le traitement des pathologies chroniques en cabinet de rééducation. Ce modèle se distingue par son **écran tactile intégré**, permettant de choisir parmi les **28 programmes préétablis**, ou de créer vos propres programmes pour répondre aux besoins de tous vos patients.

Doté de 10 cellules à **pression séquentielle et contrôlée**, l'i-Press 10+ combine **programmes prédéfinis et personnalisables** pour une prise en charge sur mesure. Chaque zone de traitement est gérée avec précision, offrant un confort optimal au patient. Idéal en complément des techniques manuelles, cet appareil allie performance, simplicité d'utilisation et efficacité clinique au quotidien.

Le modèle i-Press 10+ dispose de la fonction **recouvrement des cellules**.

Pack avec 1 paire de bottes + 1 manchon + 1 guéridon



Choose Your **Image**

1 paire de bottes - 10 cellules

Livrées avec l'appareil i-Press série 10, elles offrent un soin continu sur tout le membre inférieur grâce au chevauchement des cellules. Plus légères, elles garantissent confort et efficacité au quotidien.



Choose Your **Image**

1 manchon de bras - 7 cellules

Inclus dans ce pack, il est conçu pour le traitement ciblé du membre supérieur. Son ajustement précis et confortable s'accompagne de programmes compatibles intégrés à l'appareil.



Choose Your Image

1 guéridon

Fonctionnel et mobile, le guéridon dispose de rangements intégrés pour vos accessoires et permet d'accrocher bottes, manchons et ceinture. Ses roulettes assurent un déplacement simple et rapide dans votre cabinet.

Les avantages de l'i-Press 10+

Utilisation simple et personnalisée

- **2 modes d'utilisation** : autonome (1 programme prédéfini) ou connecté via l'application mobile.
- Programmes physiopathologiques **adaptés à de nombreuses pathologies**, dont les formes chroniques sévères comme le lymphœdème.
- **Traitement personnalisé** : sélection et isolation des cellules, mémorisation de 20 protocoles.
- **Réglages avancés** : pression, durée, suppression ou ciblage de cellules avec maintien prolongé (durée de pression et temps de repos non modifiables).
- **Affichage en temps réel** et **désactivation de cellules** via l'application.

Compression efficace et adaptable

- **Gonflage ajustable** : sens de gonflage ascendant ou descendant selon les besoins.
- **Action homogène** sur toute la circonférence pour un traitement uniforme et performant.
- **Synergie avec les techniques manuelles** : programmes conçus pour compléter les séances de drainage manuel.
- **Dégonflage automatique** en fin de traitement pour plus de confort.

Confort du patient et praticité

- **Confort optimal** : bottes légères, résistantes et conçues dans un matériau innovant.
- **Livré avec une paire de bottes 10 cellules** : chevauchement des alvéoles pour une couverture complète du membre.

- **Installation rapide** : deux connecteurs suffisent pour activer les cellules.
- **Silencieux** : niveau sonore inférieur à 40 dBA.
- **Convient aussi aux soins esthétiques et à la relaxation.**

Écran tactile intégré sur l'appareil i-Press 10+

La version 10+ de l'appareil de pressothérapie l'i-Press dispose d'un **écran tactile intégré**, avec accès à l'ensemble des programmes proposés. Ce mode offre une personnalisation avancée des séances, avec des réglages adaptés à chaque patient et à chaque pathologie.

Très **intuitif et simple d'utilisation**, il vous permet de retrouver les 28 programmes préétablis, ainsi que de créer vos propres programmes, selon les besoins de chaque patient.

NB : La version 10+ est la seule disposant d'un écran tactile intégré, les autres modèles fonctionnent avec une application mobile connectée.



Fonctionnement des programmes de l'i-Press 10+

- **Programmes préétablis pour toutes les pathologies** : Accédez rapidement aux protocoles conçus avec des praticiens renommés pour traiter diverses pathologies (avec l'application iPress).
- **Traitement personnalisé et mémorisation avancée** : Personnalisez le traitement en sélectionnant et isolant électroniquement les cellules pour une action ciblée. Paramètres personnalisables : temps de travail, temps de repos, temps de séance, nombre de cycles...

28 programmes clés intégrés

[Jambes](#)

- Pathologies veineuses :
 - Insuffisances veineuses
 - Troubles circulatoires
- Œdèmes
 - Lipœdème
 - Œdèmes inflammatoires et post-traumatiques
- Lymphœdème
 - Thérapie décongestive
 - Récidive Lymphœdème
 - Lymphœdème persistant
 - Lymphœdème transitoire / prévention Lymphœdème
- Bien-être :
 - Élimination des toxines
 - Détente
 - Récupération sportive
 - Récupération sportive intense

[Bras](#)

- Lymphœdème :
 - Thérapie décongestive
 - Lymphœdème persistant
 - Lymphœdème transitoire
- Œdème :
 - Œdème inflammatoire et post-traumatique
- Lipœdème
- Bien-être :
 - Détente
 - Récupération sportive
 - Récupération sportive intense

[Abdomen \(ceinture en option\)](#)

- Bien-être :
 - Détente
- Paresse intestinale
 - Massage stimulant

Les zones de pression



Cet appareil de pressothérapie sont conçus pour être utilisés avec des accessoires de compression ciblés, permettant une prise en charge efficace de plusieurs zones du corps :

- Membres inférieurs : traitement des jambes et des pieds via des bottes de compression.
- Membres supérieurs : traitement du bras et de l'épaule à l'aide d'un manchon de compression.
- Zone abdominale : traitement de l'abdomen grâce à une ceinture de compression.

L'action de ces dispositifs exerce une pression progressive et contrôlée sur les tissus, stimulant ainsi la circulation lymphatique et contribuant à la réduction des œdèmes, à la décongestion et au drainage.




Bras

Manchon de pressothérapie pour le bras - Idéal après une chirurgie mammaire ou un cancer du sein, ce manchon aide à prévenir et traiter les lymphoedèmes, les œdèmes post-opératoires et les troubles circulatoires. Il favorise le retour veineux et lymphatique pour une récupération optimale. (Manchons disponibles en option).



Sangle abdominale

Ceinture abdominale de pressothérapie - Conçue pour stimuler le drainage lymphatique, cette ceinture aide à éliminer les toxines, réduire les ballonnements et affiner la silhouette. Elle améliore la circulation veineuse au niveau de l'abdomen et du bas du dos, tout en apportant un soulagement musculaire et en facilitant la récupération après une intervention chirurgicale. (Ceinture disponible en option).

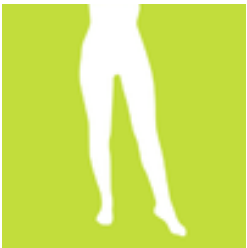

Jambes

Bottes de pressothérapie - Idéales pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ces bottes aident à éliminer les toxines, réduire la rétention d'eau et soulager les jambes lourdes. Elles contribuent à diminuer les œdèmes, améliorer la mobilité et accélérer la récupération post-opératoire, tout en réduisant le volume des zones traitées.

Les indications d'utilisation

- Lymphoedème.
- Jambes lourdes.
- Élimination des toxines.
- Récupération musculaire / récupération sportive.
- Détente.
- Massage stimulant.
- Paresse intestinale.
- Sénologie
- Insuffisances veineuse
- Œdèmes

Les contre-indications sont présentes dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie i-Press 10+

- Nombre de cellules par bottes : 10 cellules.
 - Nombre de cellules avec manchon (en option) : 7 cellules.
 - Nombre de cellules avec ceinture (en option) : 5 cellules.
- Programmes prédéfinis : 28.
- Type de flux : ascendant et descendant.
- Température de fonctionnement : 15°C à 35°C.
- Puissance : 50 VA.
- Pression réglable : 30 à 100 mmHg (par pas de 5 mmHg).
- Durée des soins : 1 à 60 minutes.
- Alimentation : secteur.

L'appareil est livré avec une paire de bottes 10 cellules.

Qu'est-ce que le drainage pneumatique ?

Le **drainage pneumatique** doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Attributs du produit :