

## Polar Frost - stick à bille



### Codes produits :

Référence 256305

### caractéristiques du produit :

Conditionnement: 75 ml

### Description brève du produit :

Le Gel Polar Frost en stick à bille est un remède instantané contre les douleurs musculaires. Appliquez ce gel de cryothérapie pour un soulagement immédiat des douleurs liées aux foulures, aux inflammations et aux tensions musculaires. Pratique et hygiénique, ce format est parfait pour une utilisation en déplacement ou sur les terrains de sport.

Permet également d'accroître les qualités d'adhérence des bandes de Kinesio Taping.

### Description du produit :

Le **gel Polar Frost** pour cryothérapie en **stick à bille** procure une sensation de froid et un effet antalgique. Il s'applique en cas de douleurs dues aux foulures, aux blessures de tissus mous ou de stress, aux inflammations ou encore à des tensions musculaires. Sa formule spéciale, à base de menthol et d'Aloe Vera apporte un soulagement durable et apaisant qui agit contre la rigidité. La texture du gel Polar Frost permet une pénétration rapide et une action instantanée.

Le gel Polar Frost est également préconisé en utilisation avec les bandes de Kinesio Taping car il permet d'accroître leurs adhérence et longévité.

### Polar Frost en stick à bille

Le Polar Frost gel refroidissant est contenu dans un flacon à billes, pour les applications non manuelles. Ce format est facile à utiliser, hygiénique et très pratique à transporter. Ce format est très utilisé sur les terrains de sport.

### Comment utiliser le gel Polar Frost ?

Appliquez une fine couche de gel sur la zone à traiter. Répétez l'opération après 5 minutes et ensuite toutes les 3 heures, pendant 3 à 5 jours.

Pour usage externe seulement.

## **Avertissements**

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou sur une peau abîmée. évitez tout contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

**Attributs du produit :**