

## Paingone Plus



### Codes produits :

Référence 182021

### caractéristiques du produit :

Courants: TENS  
Traitements: Douleurs  
Longueur: 14,9 cm  
Largeur: 4 cm  
Alimentation: Pile AAA - 1.5 V  
Garantie: 1 an  
Norme: CE Médical

### Description brève du produit :

Paingone Plus, le Stylo TENS automatique idéal pour soulager les douleurs des genoux, mains, bras...

### Description du produit :

## Avec Paingone® Plus, vous continuez à faire les choses que vous aimez faire !

Paingone Plus est idéal pour les personnes souffrant de douleurs aiguës et chroniques. Avec la version automatique du Paingone, soulagez vos douleurs où que vous soyez. Grâce à sa petite taille et son poids plume, il s'empporte partout !

Pour soulager vos douleurs instantanément maintenez le bouton d'activation enfoncé pendant 30 secondes.

Profitez de notre traitement antidouleur le plus rapide jamais mis au point avec Paingone Plus : la nouvelle génération de Paingone.

Paingone Plus vous offre un soulagement sûr et efficace de la douleur sous une forme compacte et portable. En fait, il vous offre tous les avantages de notre Paingone One original, avec encore plus de rapidité et de facilité.

Paingone peut être placé sur la plupart des zones du corps, ce qui permet de traiter un large éventail de douleurs physiques. Il suffit de maintenir Paingone® Plus sur la zone douloureuse et d'appuyer sur le bouton pour qu'il délivre le traitement.

[https://youtu.be/2Jtsxt\\_qRbo](https://youtu.be/2Jtsxt_qRbo)

Différentes études ont été menées sur des patients souffrant de différents types de douleur chronique, telles que : l'arthrose du genou, le tennis elbow, les douleurs dorsales chroniques, les douleurs musculo-squelettiques (c'est-à-dire épaule, genou, coude, douleurs lombaires), cocydyne, cervicale spondylose, douleur vertébrale, douleurs aux

membres inférieurs ou supérieurs, fibromyalgie, arthrose des doigts et épaule gelée.

Si vous avez essayé le Paingone One, mais l'avez trouvé difficile à appliquer, Paingone Plus est la solution. Il fait tout le travail pour vous !

Bien que légèrement plus grand que le Paingone One, Paingone Plus se range facilement dans un sac ou la poche d'une veste. Il est toujours là quand vous en avez besoin.

Appliquez-le directement sur la peau ou même à travers les vêtements, pour un soulagement de la douleur, où que vous soyez.

Paingone® Plus est l'appareil d'électrostimulation sans fil idéal pour tous ceux qui souhaitent un soulagement rapide et simple..



**Fonctionne avec une pile AAA**



**Soulage efficacement en 30 secondes**



**Idéal pour cibler des zones avec précision**



## Fonctionne au travers des vêtements

### Comment utiliser le Paingone Plus ?

- Placez simplement Paingone Plus sur la zone où vous souhaitez l'utiliser. Vous pouvez l'appliquer sur la peau ou l'utiliser à travers les vêtements.
- Appuyez sur le bouton d'activation et maintenez-le enfoncé. L'appareil délivre automatiquement une série d'impulsions thérapeutiques contrôlées.
- Au bout de 30 secondes, relâchez le bouton d'activation.
- De nombreux utilisateurs ressentent un soulagement peu de temps après l'application.
- Si vous devez traiter une zone de douleur plus large, vous pouvez le faire en déplaçant simplement l'appareil autour de la zone affectée.
- Traitez des zones supplémentaires en répétant les étapes ci-dessus et utilisez-le aussi souvent que nécessaire tout au long de la journée.

### La neurostimulation électrique transcutanée (ou TENS)

Le TENS est une technique d'analgésie non médicamenteuse utilisée depuis plus de 30 ans dans la prise en charge des douleurs chroniques. C'est un traitement de première ordre.

La TENS repose sur la mise en jeu des systèmes naturels de contrôle de la douleur fondée sur 2 mécanismes :

- Stimulation conventionnelle ou Gate Control
- Stimulation endorphinique

La TENS est proposée en alternative ou en complément à un traitement médicamenteux des douleurs chroniques. Elle présente aussi l'avantage de rendre le patient autonome dans la prise en charge de ses douleurs.

L'efficacité de la TENS est subordonnée à la personnalisation de la mise en place de la technique, de son apprentissage et du suivi adapté au patient.

### Les caractéristiques du Paingone Plus

- Appareil médical à TENS de classe IIa
- Testé cliniquement
- Soulage les douleurs instantanément
- Solution naturelle, sans médicaments
- Fonctionne à travers les vêtements
- Alimentation : 1 pile AAA
- Fréquence : 2,5 Hz +/- 20%
- Longueur : 14,9 cm
- Largeur : 4 cm

### Attributs du produit :