

Regoball - bundle 80 mm + 32 mm

Codes produits :

Référence 256158



caractéristiques du produit :

Appareils: Regoball

Utilisation: Cryothérapie

Utilisation: Thermothérapie

Matière: Acier inoxydable

Description brève du produit :

Regoball est une solution de massage novatrice combinant les vertus de la cryothérapie, de la thermothérapie et du massage par rouleau. Idéal pour accélérer la récupération musculaire, soulager les douleurs chroniques, les inflammations et cibler les zones douloureuses du corps. Compact et pratique, offre un soulagement naturel du stress et convient parfaitement à une utilisation pré ou post-effort.

Description du produit :

Regoball, les boules de massage pour thermothérapie et cryothérapie

Découvrez **Regoball**, une solution innovante de massage combinant les vertus thérapeutiques de la cryothérapie et de la thermothérapie. Conçu pour accélérer la récupération musculaire, soulager les douleurs chroniques et inflammations, ainsi que pour cibler les zones douloureuses du corps, Regoball offre une expérience de massage par rouleau pratique et efficace. Son design ergonomique et sa taille compacte en font un outil facile à utiliser, adapté à une utilisation sur la plupart des parties du corps, que ce soit à la salle de sport, sur le terrain ou en voyage.



UTILISATION À **FROID**

La cryothérapie est excellente pour réduire l'inflammation des tissus et favoriser la récupération musculaire après l'effort. Activez votre Regoball dans un congélateur ou un réfrigérateur pendant 2 heures et profitez de ses bienfaits pendant 6 heures.



UTILISATION À **CHAUD**

La chaleur va permettre d'apaiser les tensions musculaires en activant la circulation sanguine, d'améliorer l'élasticité et le relâchement des tissus et des muscles. Placez votre Regoball dans un bol d'eau chaude pendant 15 minutes et détendez-vous pendant 40 minutes.

Les avantages des Regoballs

- Adaptés à une utilisation pré ou post-effort.
- Favorisent l'augmentation du flux sanguin et lymphatique grâce à la libération myofasciale.
- Soulagent les tensions musculaires, les raideurs et les douleurs articulaires.
- Contribuent à la réduction du tissu cicatriciel et à l'amélioration de l'élimination de l'acide lactique.
- Combattent efficacement la fatigue musculaire.
- Apaisent naturellement le stress.
- Pratiques à transporter.

Comment fonctionnent les Regoballs ?

La température a toujours été utilisée pour soulager le corps. Le froid plutôt pour accélérer la récupération musculaire, le traitement des hématomes, ... et le chaud pour son action bénéfique au niveau des contractures ou des tensions musculaires.

Regoball a été spécialement conçue pour vous apporter les techniques de régénération des plus grands sportifs. La sphère en acier inox contient un gel thermique qui accumule du froid ou du chaud. La température sera ensuite restituée dès que la boule va rouler sur la peau. La boule de massage thermique Regoball existe en 2 formats, 80 mm et 32 mm, pour s'adapter à la zone du corps à soulager.

Regoball 80 mm

Utilisation pour froid ou chaud.

Dévisser la bague supérieure et placer la boule dans un congélateur pendant 2 heures pour une utilisation à froid (jusqu'à 6 h) ou dans un bol d'eau bouillante pendant 15 mn pour une utilisation à chaud (jusqu'à 40 mn). Utiliser la boule (sous la voute plantaire par exemple) ou la replacer dans sa coque pour une utilisation sur le corps (jambes, dos, épaules...) et sur tous les muscles endoloris.

[Zones de traitement](#)

Elle s'utilise facilement et est réutilisable à volonté, notamment sur les endroits du corps suivant :

- Épaule / Coiffe des rotateurs.
- Genou / Ligament croisé antérieur.
- Mal de dos / Mal de cou.
- Arthrite.
- Triceps / Biceps / Quadriceps / Muscles de l'avant bras.

Regoball 32 mm

Utilisation à froid uniquement, sur des zones ciblées.

Placer la Regoball 32 mm dans un congélateur ou un réfrigérateur pendant 2 heures. Utiliser la Regoball sur des zones ciblées de votre corps (visage, cou, mains). La balle peut être totalement retirée de son support afin d'être utilisée sous le pied (fasciite plantaire), sur le dos, les épaules... ou tout simplement pour être lavée.

[Indications visage](#)

Après avoir retiré la boule de massage Regoball Mini 32mm de votre congélateur, utilisez-la pour effectuer des mouvements circulaires, ascendants et descendants sur votre visage pendant un maximum de 10 minutes. Cette technique vous permettra de profiter des bienfaits d'un traitement de cryothérapie facial, offrant les effets suivants :

- Réduction des inflammations.
- Réduction des gonflements.
- Résultats visibles instantanément.
- Peau plus ferme, plus saine, plus éclatante et rajeunie.
- Augmentation du tonus musculaire.
- Meilleure absorptions des crèmes pour les soins de la peau.
- Éclaircissement des zones de cernes sous les yeux.
- Effet analgésique (soulagement des douleurs).
- Effet thérapeutique pour les peaux sujettes à l'acné et à l'eczéma.

Les caractéristiques des Regoballs

- Boule en acier inoxydable contenant un thermogel, base en ABS résistant aux chocs.

Attributs du produit :

