

i-Press 10C avec paire de bottes - appareil de pressothérapie



Codes produits :

Référence 280035

caractéristiques du produit :

Pression: 10 - 100 mmHg

Nbre de cellules: 10

Description brève du produit :

Optimisez vos traitements avec l'i-Press 10C, un appareil de pressothérapie innovant. Offrant une interface tactile intuitive et des programmes personnalisables, il assure un confort maximal pour les patients. En complément des techniques manuelles, il propose une pressothérapie séquentielle avec une pression contrôlée adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient. Idéal pour les kinésithérapeutes, l'i-Press 10C allie performance et facilité d'utilisation.

Livré avec une paire de bottes 10 cellules Optimum.

Description du produit :

L'**i-Press 10C** est un appareil de pressothérapie innovant, idéal pour le traitement des pathologies chroniques. Avec une interface tactile intuitive et des programmes personnalisables, il offre un confort optimal pour les patients. En tant que complément unique aux techniques manuelles, i-Press propose une pressothérapie séquentielle et programmable. Chaque cellule exerce une pression contrôlée, et les mouvements coordonnés s'ajustent aux besoins spécifiques de vos patients. Parfait pour les kinésithérapeutes, il allie performance et simplicité d'utilisation.

Les avantages de l'i-Press 10C

- **Programmes préétablis pour toutes les pathologies** : Accédez rapidement aux protocoles conçus avec des praticiens renommés pour traiter diverses pathologies.
- **Traitement personnalisé et mémorisation avancée** : Personnalisez le traitement en sélectionnant et isolant électroniquement les cellules pour une action ciblée ; enregistrez jusqu'à 20 traitements pour une prise en charge optimale. Paramètres personnalisables : temps de travail, temps de repos, temps de séance, nombre de cycles....
- **Action sur toute la circonférence et surface étendue** : La pression est appliquée uniformément sur une large zone pour un traitement efficace.
- **Compression spécifique en complément du drainage manuel** : Travaillez en synergie avec les

- techniques de drainage manuel grâce à des programmes ajustant pression, cycle et rythme selon les besoins.
- **Confort optimal et durabilité des cellules** : Les nouvelles bottes, en matériau innovant, sont légères, résistantes et offrent un confort maximal pour le patient.
 - **Fonctionnement autonome** : L'appareil fonctionne indépendamment et ne nécessite aucune intervention pendant la séance.
 - **Installation rapide** : Connectez simplement les bottes avec seulement deux connecteurs pour alimenter les cellules.

<https://youtu.be/izf2U5K6ucl>

Les équipements de l'I-Press 10C

- **Traitement personnalisé** : Sélection et isolation des cellules, avec mémorisation de 20 traitements.
 - **Flux** : ascendant et descendant + constants grâce aux cellules à recouvrement (chevauchées).
 - **Affichage en temps réel** : Réglez et visualisez la durée des séances de traitement en temps réel pour un contrôle précis.
 - **Gonflage ajustable** : Modifiez facilement le sens de gonflage des cellules (ascendant ou descendant) pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.
 - **Dégonflage automatique** : Profitez d'un dégonflage actif en fin de séance pour un traitement en toute simplicité.
 - **Interface tactile intuitive** : L'écran tactile couleur simplifie l'utilisation avec une navigation fluide et une interface conviviale.
 - **Désactivation des cellules depuis l'écran tactile.**
 - **Programmes physiopathologiques avancés** : Profitez de programmes spécifiques pour la résorption et la fragmentation, adaptés aux besoins physiologiques de vos patients.
 - **Adapté aux pathologies chroniques sévères** : Conçu pour une prise en charge efficace des pathologies comme le lymphœdème.
 - **Polyvalence d'utilisation** : Convient également aux soins esthétiques, de relaxation et de détente.
 - **Silencieux** : niveau sonore inférieur à 40 dBA.
-
- **Livré avec une paire de bottes Optimum 10 cellules** : un bon rapport qualité-prix, plus légères, elles permettent un traitement continu sur tout le membre grâce au chevauchement des alvéoles.

Indications

- **Système Veineux** : Insuffisance veineuse, Varices, Problèmes de rétention d'eau « jambes lourdes », Ulcères.
- **Système lymphatique** : Dysfonctions du système lymphatique, Oedèmes.
- **Esthétique** : Détente, Complément des techniques d'amincissement.

Programmes clés de l'I-Press 10C

Résorption

Indications : Jambes lourdes, pas de présence de varices, pas d'œdème.

Ces programmes sont utilisés lorsque le sujet se plaint de douleurs, lourdeurs, tiraillements dans les jambes. Ces signes sont provoqués ou accentués par une position debout ou assise prolongée, et s'installent progressivement au cours de la journée.

L'effet recherché étant une assistance veineuse, le programme de résorption va entraîner une accélération du flux veineux. Pour réaliser cette accélération, en évitant pour ce faire d'écraser les veines superficielles, les pressions exercées doivent rester relativement faibles. Ces pressions peuvent cependant être légèrement augmentées si le thérapeute veut agir sur le réseau veineux profond.

Effleurage

Indications : Jambes lourdes, présence de varices, obésité.

Ces programmes sont utilisés lorsque les jambes lourdes sont accompagnées de la présence de varices.

Il tient compte de l'endommagement des valvules veineuses (révélé par la présence de varices). Il effectue, après avoir

vidé chaque portion de veine, un garrot de sécurité (en maintenant gonflée l'alvéole en amont de celle qui vient d'être dégonflée) pour que cette partie de la veine se remplisse physiologiquement par l'artère et non par le reflux veineux.

Fragmentation

Indications : Œdème lymphatique persistant.

L'application de l'onde de pression est fragmentée :

La première application de la pression s'effectue à la racine du membre, les suivantes aux alvéoles en aval pour retourner vers la racine, et ainsi de suite. En dernière étape du cycle, l'onde de pression part de l'extrémité du membre pour arriver jusqu'à la racine.

Indications : Ce programme est utilisé lorsqu'un œdème, présent toute la journée, ne s'atténue pas au cours de la nuit. Le temps du traitement est important pour une efficacité optimale.

Résorption peristaltique globale

Indication : Cellulite, méthode drainage.

L'alvéole 1 est gonflée puis dégonflée et regonflée, puis la 2 est gonflée, dégonflée et regonflée, et ainsi de suite pour les alvéoles suivantes jusqu'à la 7 ou 10 et sont dégonflées toutes à la fois en fin de cycle.

Le programme de résorption péristaltique est le plus proche des manœuvres de drainage lymphatique manuel.

Autres informations

Ciblage de la zone de soin :

- Inférieur : cheville, genou, hanche.
- Supérieur : poignet, coude, épaule.

3 modes de fonctionnement :

- **Segmentaire** : Le programme s'applique uniquement sur la zone sélectionnée.
- **Augmentation du temps de passage** : Le programme s'applique sur tout le membre mais ralentira au niveau de la zone sélectionnée.
- **Augmentation des passages** : Le programme s'applique sur tout le membre mais passera 3 fois au niveau de la zone sélectionnée.

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie i-Press 10C

- I-press 10C : 10 cellules.
- Dimensions : 34 x 32 x 14 cm.
- Poids : 4,9 kg.
- Alimentation : secteur.
- Puissance : 50 VA.
- Niveau sonore : 38 | 40 dBA.
- Pression réglable : 13 à 133 mbar (10 à 100 mmHG).

Livré avec une paire de bottes 10 cellules Optimum.

Qu'est-ce que le drainage pneumatique ?

Le **drainage pneumatique** doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Attributs du produit :