

Sonde vaginale Periform +



Codes produits :

Référence 140227

caractéristiques du produit :

Type de sonde: Vaginale
Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm
Longueur: 65 mm
Longueur: 94 mm
Diamètre: 34 mm

Description brève du produit :

La sonde vaginale Periform + permet un bon contact avec les muqueuses vaginales et sa forme lui confère un bon maintien en place lors des séances de rééducation. Préconisée les professionnels de la rééducation périnéale Post-Partum.

Description du produit :

Idéale pour la rééducation périnéale post-partum.

La **sonde vaginale Periform +** permet un bon contact avec les muqueuses vaginales. Sa forme anatomique profilée unique lui confère un bon maintien en place lors des séances de rééducation et lui permet de résister aux mouvements latéraux.

Elle s'utilise en électrostimulation périnéale (méthode passive par stimulation) ou en Biofeedback (méthode active avec des contractions à effectuer et à visualiser sur l'écran de la sage-femme ou du kinésithérapeute).

2 électrodes profilées situées de chaque côté pour suivre les mouvements de la paroi vaginale et le confort des patientes.

Indicateur de contractions du plancher pelvien

Un tige (fournie) peut-être clipsée sur la sonde pour effectuer des exercices de contractions périnéales chez soi, et ainsi mieux visualiser si la contraction est effectuée correctement :

- Si la tige pointe vers le bas lors de la contraction, celle-ci est correctement effectuée.
- Inversement si la tige monte : la contraction n'est pas correcte.

Cette tige amplifie les mouvements du plancher pelvien et permet ainsi un meilleur retour visuel.

La tige est démontable en trois parties et est d'une longueur totale de 27.5 cm pour une bonne visualisation.

<https://youtu.be/HMQbmP6tMdl>

Indications

La sonde vaginale Periform + est largement conseillée par les professionnels pour :

- Rééducation périnéale Post-Partum
- Rééducation pour un prolapsus
- Béance vulvaire
- Traitement de l'incontinence d'effort
- Traitement de l'incontinence par impériosité
- Traitement de l'incontinence mixte
- Traitement de l'instabilité vésicale

Les caractéristiques de la sonde vaginale Periform +

- Diamètre : 34 mm
- Longueur totale : 94 mm
- Longueur corps de la sonde : 65 mm
- Poids : 19 g
- Longueur câble : 340 mm
- 2 fiches femelles 2 mm
- Surface électrodes : 4,9 cm² x 2
- Insertion facile
- Implantation très stable
- Utilisation en stimulation et bio
- Utilisable debout ou allongée
- Forme lisse simple à nettoyer

Équipée de 2 connecteurs femelles 2mm, la sonde peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback approuvés par la CEI 60601 (se référer aux instructions du fabricant avant utilisation).

Attributs du produit :