
Tablette de 24 comprimés de désinfection pour POWERBreathe



Codes produits :

Référence 271865

caractéristiques du produit :

Quantité: 24 comprimés

Description brève du produit :

Cette solution de nettoyage par bain de trempage désinfectera et nettoiera votre spiromètre Power Breath et embout.

Description du produit :

Il est recommandé de nettoyer environ une fois par semaine votre spiromètre Power Breath ainsi que l'embout buccal.

Cette tablette de 24 comprimés de désinfection est une solution de nettoyage par bain de trempage. Elle désinfectera et nettoiera votre Power Breath et embouts.

Conseils et instructions de nettoyage

- Nettoyez votre Power Breath à l'eau tiède pour éliminer les traces de salives
- Préparez la solution de stérilisation dans un récipient non métallique
- Faites fondre la pastille dans 2 litres d'eau
- Immergez complètement le Power Breath dans la solution en s'assurant qu'aucunes bulles d'air ne reste à l'intérieur de l'appareil
- Laissez le Power Breath immerger dans la solution environ 30 minutes
- Retirez le Power Breath et le rincez soigneusement à l'eau courante
- Secouez-le pour éliminer l'excédent d'eau et laissez-le sécher sur une serviette propre
- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir été en contact avec la solution

Attributs du produit :

